

Gebrauchsanweisung: Informationen für dich.

ARE YOU?

HIGH

THC-Duo Selbst-Test

für Fahrenfänger und Erfahrene

Laborgeprüfte* Qualität in 5 Minuten

Wofür ist der Schnelltest?

Mit dem AREYOU? High THC-Duo Selbst-Test kannst du einfach und schnell prüfen, ob in deinem Urin noch Spuren von THC-Abbauprodukten nachweisbar sind. Das Ergebnis gibt dir eine Orientierung und unterstützt dich dabei, Risiken besser einzuschätzen und verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen.

Die AREYOU? Testkassetten werden aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt und sind zu 98 % plastikfrei*. Unsere regionale Produktion in Deutschland und der Schweiz senkt unseren CO₂-Fußabdruck und bietet eine umweltfreundliche Alternative für alle, die wissen wollen, wo sie stehen.

Bitte lies diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um den Test korrekt durchzuführen und die Ergebnisse zuverlässig auszuwerten.

Wichtige Hinweise:

Zweck und Anwendung

- Dieser Selbst-Test dient ausschließlich der privaten, nicht-medizinischen und nicht-diagnostischen Selbstinformation

und Orientierung. Er kann dir also bei deiner eigenen persönlichen Einschätzung helfen.

- Es ist stets zu berücksichtigen, dass der Test und sein Ergebnis von einer Vielzahl von Faktoren abhängen und auch die Möglichkeit eines ausnahmsweise falschen Testergebnisses besteht. Der Test ist nicht zur Diagnose, Behandlung oder Bewertung gesundheitlicher Zustände bestimmt und nicht für gesundheitsbezogene Entscheidungen geeignet. Er ist nicht für behördliche, forensische, straf-, arbeitsrechtliche oder klinische Anwendungen vorgesehen. Er ersetzt keine ärztliche Untersuchung oder Bestätigungsanalyse mittels Labordiagnostik.
- Für medizinisch und rechtlich verbindliche Aussagen wende dich bitte an ein medizinisches Labor, ärztliches Fachpersonal und lass dich auch juristisch beraten.
- Bitte berücksichtige auch, dass der Test für Erwachsene, also Personen ab 18 Jahren ist.

Allgemeine Information

In Deutschland gelten im Straßenverkehr seit dem 22.08.2024 folgende gesetzliche Grenzwerte gemäß § 24a und § 24c des des Straßenverkehrsgesetzes (StVG): -1,0 ng/ml $\Delta 9$ -THC im Blutserum für Fahrenfänger in der Probezeit und Personen unter 21 Jahren.

-3,5 ng/ml $\Delta 9$ -THC im Blutserum für erfahrene Verkehrsteilnehmer.

Bitte beachte: Diese gesetzlichen Grenzwerte beziehen sich auf die Werte im Blut. Der AREYOU? High THC-Duo Selbst-Test weist THC-Abbauprodukte ($\Delta 9$ -THC-COOH) im Urin nach und erlaubt daher keinen direkten Rückschluss auf Blutwerte. Er gibt nur eine möglichst genaue Orientierung.

Was macht diesen Schnelltest besonders?

- Zwei Teststreifen: Für Fahrenfänger und erfahrene Verkehrsteilnehmer.
- Präzise Ergebnisse in nur 5 Minuten.
- Testkassette zu 98 % plastikfrei*
- Laborgeprüfte Qualität**.
- Bewährte Technologie aus dem professionellen Bereich – jetzt für die private Anwendung.

Welchen Teststreifen soll ich ablesen?

Teststreifen 1 (links):

für Fahrenfänger (in der Probezeit und Personen unter 21 Jahren)
Nachweis ab 50 ng/ml THC-Abbauprodukt ($\Delta 9$ -THC-COOH).

Teststreifen 2 (rechts):

für erfahrene Verkehrsteilnehmer (über 21 Jahre und nicht mehr in der Probezeit)
Nachweis ab 150 ng/ml THC-Abbauprodukt ($\Delta 9$ -THC-COOH).

Die Nachweisgrenzen der beiden Teststreifen orientieren sich an allgemeinen Vergleichswerten aus der Verkehrsprävention.

Wie wende ich den Schnelltest an?

Vorbereitung:

- Bitte prüfe vor der Anwendung, ob die Verpackung und alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.
- Bringe den Test vor der Durchführung auf Raumtemperatur (+15 °C bis +30 °C).
- Stelle einen sauberen Urinbecher und eine Stoppuhr bereit.
- Wasche deine Hände gründlich oder verwende saubere Handschuhe.
- Verwende den Test sofort nach dem Öffnen der Verpackung.

Anwendung:



- Fange in einem sauberen Becher deine Urinprobe ab.



- Öffne die Verpackung und klappe die beiden Flügel des Tests nach oben.



- Tauche die Teststreifen für 15 Sekunden in deine Urinprobe ein.



- Klappe die Flügel wieder zu und lege den Test flach auf eine saubere Unterlage.



- Starte die Stoppuhr und lies das Ergebnis nach mindestens 5, aber maximal 10 Minuten ab.



- Lies nur das Ergebnis des Streifens ab, der für dich vorgesehen ist (siehe „Welchen Teststreifen soll ich ablesen?“).

Wie lese ich das Ergebnis korrekt ab?



Negativ

Die Kontrolllinie (C) und Testlinie (T=THC) sind sichtbar.

Auch eine leichte Linie zeigt ein negatives Ergebnis. Der THC-Wert im Urin liegt unterhalb der Nachweisgrenze des Tests.



Positiv

Nur die Kontrolllinie (C) ist sichtbar. Der THC-Wert im Urin liegt über der Nachweisgrenze des Tests.



Ungültig

Keine Kontrolllinie (C) sichtbar
→ Bitte Testvorgang mit neuem Schnelltest wiederholen.

Was sollte ich dazu wissen?

Nach dem Konsum kann es einige Zeit dauern, bis THC-Abbauprodukte im Urin nachweisbar sind. Bitte führe den Test daher nicht kurz nach dem Konsum durch. Die Nachweiszeit von THC im Urin hängt stark von der Konsum-Häufigkeit, Menge und deinem Stoffwechsel ab. Bei häufigem und regelmäßigem Cannabis-Konsum kann die Konzentration von THC-Abbauprodukten im Urin dauerhaft erhöht sein.

Die Nachweisgrenzen behördlicher Vor- tests können von denen des AREYOU? High THC-Duo Selbst-Tests abweichen. Das Testergebnis dient daher nur deiner privaten Orientierung und Selbstinformation.

Was muss ich noch beachten?

Nur für den einmaligen Gebrauch. Kühl und trocken lagern (+2 °C bis +30 °C). Nicht einfrieren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vermeide direkten Hautkontakt mit der Urinprobe und den Testmaterialien. Verwende den Test nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums oder wenn die Verpackung beschädigt ist.

Inhalt

- 1 AREYOU? High THC-Duo Selbst-Test
- 1 Gebrauchsanweisung
- 1 Silica-Gel

Wie funktioniert der Schnelltest genau?

Der Schnelltest basiert auf einem kompetitiven Immunoassay. Dabei konkurriert der gesuchte Stoff (Analyt) in deiner Urinprobe mit einem künstlich zugesetzten, markierten Vergleichsstoff um dieselben Antikörper-Bindungsstellen. Ist der gesuchte Stoff in höherer Menge vorhanden, blockiert er die Antikörper und verhindert, dass der markierte Vergleichsstoff binden

kann – es erscheint keine Testlinie (Ergebnis: positiv). Ist der gesuchte Stoff nicht oder nur in geringer Menge vorhanden, kann der Vergleichsstoff binden und es bildet sich eine Testlinie (Ergebnis: negativ). Die Intensität der Linie kann variieren; auch eine sehr schwache Linie gilt als negativ.

Kann ein Schnelltest auch Fehler machen?

Wie bei jeder immunologischen Methode können Kreuzreaktionen mit Stoffwechselprodukten oder anderen verwandten Substanzen auftreten und falsch-positive oder falsch-negative Ergebnisse erzeugen. Durch eine falsche Anwendung des Tests oder ungeeigneter Probe kann es zu falschen Ergebnissen kommen. Schnelltests liefern grundsätzlich ein qualitatives, vorläufiges Ergebnis. Eine zweite, beweisichere Analysemethode muss verwendet werden, um ein bestätigtes Ergebnis zu erhalten.

Was tun, wenn ich mir wegen meines Konsums Gedanken mache?

Dieser Test ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung. Wenn du aufgrund deines Konsums besorgt bist, wende dich bitte an deinen Arzt oder eine Beratungsstelle. Die bundesweite digitale Suchtberatung für Betroffene und Angehörige ist kostenlos unter folgender URL zu erreichen: www.suchtberatung.digital

Wie entsorge ich den Schnelltest?

Der verwendete Test gehört aufgrund der enthaltenen Urinprobe sowie einzelner nicht recycelbarer Bestandteile in den Restmüll. Bitte entsorge ihn nach der Anwendung sicher verpackt im Hausmüll und beachte die örtlichen Entsorgungsvorschriften. Die Einzelverpackung (Pouch) ist im

Dualen System (Grüner Punkt) lizenziert. Bitte entsorge den Pouch im Gelben Sack bzw. in der Gelben Tonne, damit das Material in Sortier- und Recyclinganlagen bestmöglich verwertet werden kann. Bei Mehrfachpackungen: Die Faltschachtel aus Karton bitte über die Papiertonne entsorgen.

Welche Materialien verwendet AREYOU?

Die Tests von AREYOU? werden so ressourcenschonend entwickelt wie kaum ein anderer Schnelltest. Die Testkassette besteht dabei zu 98 % aus nachwachsenden Rohstoffen. Leider können wir noch nicht ganz auf Kunststoff verzichten: Es braucht noch geringe Mengen, damit der Test reibungslos funktioniert (z. B. Beschriftungsfolie und Teststreifen). Die Einzelverpackung (Pouch) besteht aus Papier mit einer dünnen PE-Feuchtigkeitsbarriere. So bleibt der Test bis zum Ablaufdatum zuverlässig geschützt. Wir arbeiten jeden Tag daran, den Kunststoffanteil unserer Produkte weiter zu reduzieren. Weitere Informationen zur Materialzusammensetzung findest du auf unserer Website: www.areyou.de

AREYOU? und der BADS

Dieser Test wird unterstützt vom Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (BADS). Bitte denke immer daran: Schon geringe THC-Mengen können die Fahrsicherheit beeinträchtigen. Nur nüchtern und rauschfrei fährst du sicher. Mehr Informationen unter: safetrip.bads.de

Symbolverzeichnis



Von links nach rechts:

- Nicht wiederverwenden
- Nicht verwenden, wenn Verpackung geöffnet oder beschädigt ist

- Gebrauchsanweisung beachten
- Vor Nässe schützen
- Vor Sonnenlicht schützen
- Bei 2–30 °C lagern

Hersteller:

Protzek Biotec GmbH
Tüllingerstr. 36a, 79539 Lörrach
www.areyou.com, info@proteck.com

Du hast Fragen?

service@areyou.de

Hier geht's zur Videoanleitung und zum Webshop.



Are you looking for another language? Scan this QR code:



weitere Sprachen

* Bezogen auf die Testkassette ohne Teststreifen und Verklebung. 2 % Plastikanteil ergeben sich durch die Beschriftungsfolie. Weitere Informationen auf der Website: areyou.de
** Geprüft nach validierten Verfahren im nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485 zertifizierten Herstellerlabor.