

Gebrauchsanweisung: Informationen für dich.

ARE YOU?



Multi Substanz-Test Erkennt 6 Substanzen

Laborgeprüfte Qualität in 5 Minuten

Wofür ist der Schnelltest?

Mit dem AREYOU? High Multi Substanz-Test kannst du in wenigen Minuten prüfen, ob in einer Probe (z. B. einem Pulver oder einer Flüssigkeit) eine oder mehrere der folgenden Substanzen bzw. Substanzklassen vorhanden sind: Kokain, Methamphetamin („Meth“), Fentanyl, Opiate (u. a. Morphin, Codein, Heroin), Amphetamin („Speed“) und MDMA („Ecstasy“). Der Substanz-Test unterstützt dich dabei, Risiken besser einzuschätzen und informierte Entscheidungen zu treffen. Er ist einfach und überall anwendbar – für schnelle Antworten in nur 5 Minuten. Nicht regulierte oder illegal gehandelte Stoffe können verunreinigt, mit unerwarteten Substanzen versetzt oder falsch deklariert sein. Hochpotente Wirkstoffe wie Fentanyl können dabei bereits in sehr geringen Mengen ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen. Mit diesem Test kannst du eine Stoffprobe untersuchen und Hinweise darauf erhalten, ob bestimmte gefährliche Substanzen enthalten sind. Bitte lies diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um den Test korrekt durchzuführen und die Ergebnisse zuverlässig auszuwerten.

Wichtige Hinweise:

Zweck und Anwendung

- Dieser Substanz-Test dient ausschließlich der privaten, nicht-medizinischen und nicht-diagnostischen Selbstinformation und Orientierung. Er kann dir bei deiner eigenen persönlichen Einschätzung helfen.

- Der Test ist ausschließlich zur Untersuchung von Stoffproben (z. B. Pulver oder Flüssigkeiten) bestimmt und nicht zur Anwendung am Menschen oder mit menschlichen Proben vorgesehen.
- Der Test ist nicht für gesundheitsbezogene Entscheidungen und auch nicht für rechtsverbindliche Beurteilungen geeignet. Für medizinisch und rechtlich verbindliche Aussagen wende dich bitte an ein medizinisches Labor, ärztliches Fachpersonal und lass dich auch juristisch beraten.
- Der Test ersetzt keine umfassende chemische Analyse und kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
- Es ist stets zu berücksichtigen, dass der Test und sein Ergebnis von einer Vielzahl von Faktoren abhängen und auch die Möglichkeit eines ausnahmsweise falschen Testergebnisses besteht.
- Bitte berücksichtige auch, dass der Test für Erwachsene, also Personen ab 18 Jahren ist.

Allgemeine Information

In Deutschland gilt, dass die/der unerlaubte/r Herstellung, Erwerb, Besitz, Handel etc. von Drogen nach dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) strafbar ist (§§ 29 ff. BtMG). Der AREYOU? High Multi Substanz-Test dient ausschließlich deiner privaten Information und Orientierung. Er entbindet nicht von den gesetzlichen Regelungen. Die Anwendung, Interpretation und Nutzung der Testergebnisse liegt in deiner Verantwortung, ebenso die Entscheidungen, die du triffst, und deren etwaige Konsequenzen.

Was macht diesen Schnelltest besonders?

- Erkennt 6 verschiedene Substanzen bzw. Substanzklassen.
- Präzise Ergebnisse in nur 5 Minuten.
- Testkassette zu 98 % plastikfrei*
- Laborgeprüfte Qualität**
- Bewährte Technologie aus dem professionellen Bereich – jetzt für die private Anwendung.

Welche Substanzen werden getestet?

Der AREYOU? High Multi Substanz-Test kann folgende 6 Substanzen bzw. Substanzklassen in einer Probe nachweisen:

Substanzkürzel (auf der Testkassette)	Substanz (-Klasse)	Szene-Namen
COC	Kokain	„Koks“; „Coke“; „Schnee“
MET	Methamphetamin	„Meth“; „Crystal Meth“; „Ice“
FYL	Fentanyl (synthetisches Opioid)	„Fenta“
OPI	Opiate (klassische, nicht-synthetische Opioide)	u. a. Morphin, Codein, Heroin
AMP	Amphetamin	„Speed“; „Pep“
MDMA	MDMA (Amphetamin-Derivat)	„Ecstasy“; „Emma“; „Molly“

Wie wende ich den Schnelltest an?

Beim Umgang mit unbekannten Proben, Flüssigkeiten etc. ist besondere Vorsicht geboten. Vermeide direkten Haut- und insbesondere Schleimhautkontakt und probiere, rieche oder inhaliere die Substanz nicht. Trage nach Möglichkeit Einweghandschuhe, bei unbekannten oder potenziell gefährlichen Proben zusätzlich eine Schutzbrille und gegebenenfalls einen Atemschutz.

Vorbereitung:

- Überprüfe vor der Anwendung, ob die Verpackung und alle Teile des Tests vollständig und unbeschädigt sind.
- Bringe den Test vor der Durchführung auf Raumtemperatur (+15 °C bis +30 °C).
- Stelle einen Timer oder eine Uhr bereit.
- Verwende saubere Einweghandschuhe.
- Verwende den Test sofort nach dem Öffnen der Verpackung.

Anwendung:



- Lege den Test auf eine saubere und ebene Oberfläche.
- Bei Proben in Tablettenform: Kratze mit dem Probentransferstick etwas Probe von der Tablette auf eine saubere Unterlage ab.
- Öffne das Droppergefäß, indem du die gesamte Verschlusskappe aufdreht und abziehst. Achte darauf, den Extraktionspuffer nicht zu verschütten.
- Gib eine kleine Menge der zu testenden Probe in den Extraktions-

puffer: Pulver überführst du mit dem Probentransferstick, Flüssigkeiten kannst du direkt eintropfen. Der Test ist hochsensitiv; bereits wenige Krümel oder ein Tropfen reichen aus. Eine zu große Probenmenge kann den Test „überladen“ und zu falschen Ergebnissen führen.



- Verschließe das Droppergefäß wieder mit der Verschlusskappe. Schüttle den Extraktionspuffer vorsichtig für 15 Sekunden und lass den Extraktionspuffer für weitere 30 Sekunden ruhig stehen.
- Drehe nun den transparenten Deckel der Verschlusskappe mit einer Drehbewegung ab.
- Gib in jedes Probenaufgabefenster 3 Tropfen, indem du das Droppergefäß leicht zusammenrückst.
- Starte den Timer und lies das Ergebnis nach mindestens 5 bis maximal 10 Minuten ab.

Wie lese ich das Ergebnis korrekt ab?

Schritt 1: Gültigkeit prüfen

Die Kontrolllinie (C) muss immer sichtbar sein. Ist keine Kontrolllinie (C) sichtbar, ist der Test ungültig und darf nicht ausgewertet werden.

Schritt 2: Einzelne Substanzen auswerten

Der AREYOU? High Multi Substanz-Test zeigt für jede Substanz eine eigene Testlinie (T) an. Jede Testlinie ist mit einem Substanzkürzel gekennzeichnet. Substanzkürzel siehe Tabelle.

Jede Substanz wird unabhängig von den anderen bewertet.



Kontrolllinie (C) und Testlinie (T) sind sichtbar

Negativ



Auch eine leichte Linie zeigt ein negatives Ergebnis.

Negativ



Nur die Kontrolllinie (C) ist sichtbar.

Positiv



Keine Kontrolllinie (C) sichtbar. Mit neuem Schnelltest wiederholen.

Ungültig

Was bedeuten die Testlinien?



Jede Testlinie steht für eine getestete Substanz (siehe Substanztabelle).



C OPI
COC AMP
MET MDMA
FYL



Alle negativ: Substanz nicht nachgewiesen.

Die entsprechende Substanz liegt nicht vor oder ist unterhalb der Nachweisgrenze. Auch eine sehr schwache Testlinie gilt als negatives Ergebnis.



Testlinie positiv: Substanz nachgewiesen.

Die entsprechende Substanz liegt oberhalb der Nachweisgrenze und ist in der Probe vorhanden.

Was sollte ich dazu wissen?

Der AREYOU? High Multi Substanz-Test weist ausschließlich die in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Substanzen bzw. Substanzklassen nach. Andere Stoffe oder Beimischungen, die nicht genannt sind, werden vom Test nicht erfasst. Ein negatives Testergebnis bedeutet daher nicht, dass die untersuchte Probe mit Sicherheit frei von weiteren potenziell gesundheitsgefährlichen Stoffen ist. Der Test liefert keine Angaben zur Konzentration oder Reinheit einzelner Substanzen.

- Inhalt**
- 1 AREYOU? High Multi Substanz-Test
 - 1 Probentransferstick
 - 1 Droppergefäß mit Puffer
 - 1 Gebrauchsanweisung
 - 1 Silica-Gel-Pad (Trockenmittel – nicht verwenden!)

Wie funktioniert der Schnelltest genau?

Der Schnelltest basiert auf einem kompetitiven Immunoassay. Dabei konkurriert der gesuchte Stoff (Analyt) in deiner Probe mit einem künstlich zugesetzten, markierten Vergleichsstoff um dieselben Antikörper-Bindungsstellen. Ist der gesuchte Stoff in höherer Menge vorhanden, blockiert er die Antikörper und verhindert, dass der markierte Vergleichsstoff binden kann – es erscheint keine Testlinie (Ergebnis: positiv). Ist der gesuchte Stoff nicht oder nur in geringer Menge vorhanden, kann der Vergleichsstoff binden und es bildet sich eine Testlinie (Ergebnis: negativ). Die Intensität der Linie kann variieren; auch eine sehr schwache Linie gilt als negativ.

Kann ein Schnelltest auch Fehler machen?

Wie bei jeder immunologischen Methode können Kreuzreaktionen mit strukturell ähnlichen Substanzen auftreten und falsch-positive oder falsch-negative Ergebnisse erzeugen. Durch eine falsche Anwendung des Tests oder eine ungeeignete Probe kann es zu falschen Ergebnissen kommen. Schnelltests liefern grundsätzlich ein qualitatives, vorläufiges Ergebnis. Eine zweite, beweisichere Analyseverfahren muss verwendet werden, um ein bestätigtes Ergebnis zu erhalten.

Was tun, wenn ich mir wegen meines Konsums Gedanken mache?

Dieser Test ersetzt keine Labordiagnose oder ärztliche Beratung. Wenn du aufgrund deines Konsums besorgt bist, wende dich bitte an einen Arzt oder eine Beratungsstelle. Die bundesweite digitale Suchtberatung für Betroffene und Angehörige ist kostenfrei unter folgender URL zu erreichen: www.suchtberatung.digital

Wie entsorge ich den Schnelltest?

Der verwendete Test sowie die anderen Testbestandteile (Probentransferstick und Droppergefäß mit Puffer) gehören aufgrund der enthaltenen Probe sowie einzelner nicht recycelbarer Bestandteile in den Restmüll.

Bitte entsorge alles nach der Anwendung sicher verpackt im Hausmüll und beachte die örtlichen Entsorgungsvorschriften. Die Einzelverpackung (Pouch) ist im Dualen System (Grüner Punkt) lizenziert. Bitte entsorge den Pouch im Gelben Sack bzw. in der Gelben Tonne, damit das Material in Sortier- und Recyclinganlagen bestmöglich verwertet werden kann. Bei Mehrfachpackungen: Die Faltschachtel aus Karton bitte über die Papiertonne entsorgen.

Welche Materialien verwendet AREYOU?

Die Tests von AREYOU? werden so ressourcenschonend entwickelt wie kaum ein anderer Schnelltest. Die Testkassette besteht dabei zu 98 % aus nachwachsenden Rohstoffen. Leider können wir noch nicht ganz auf Kunststoff verzichten: Es braucht noch geringe Mengen, damit der Test reibungslos funktioniert (z. B. Beschriftungsfolie und Teststreifen). Die Einzelverpackung (Pouch) besteht aus Papier mit einer dünnen PE-Feuchtigkeitsbarriere. So bleibt der Test bis zum Ablaufdatum zuverlässig geschützt. Wir arbeiten jeden Tag daran, den Kunststoffanteil unserer Produkte weiter zu reduzieren. Nähere Informationen zur Materialzusammensetzung findest du auf unserer Website: www.areyou.de

Symbolverzeichnis



2 °C 30 °C

- Von links nach rechts:**
- Nicht wiederverwenden
 - Nicht verwenden, wenn Verpackung geöffnet oder beschädigt ist
 - Gebrauchsanweisung beachten
 - Vor Nässe schützen
 - Vor Sonnenlicht schützen
 - Bei 2–30 °C lagern

Was muss ich noch beachten?

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Kontakt von Probenmaterial und Testreagenzien mit Haut und Schleimhäuten vermeiden. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

Hersteller:
Protzek Biotech GmbH
Tüllingerstr. 36a, 79539 Lörrach
www.areyou.com, info@proteck.com

Du hast Fragen?
service@areyou.de

Hier geht's zur Videoanleitung und zum Webshop.



Are you looking for another language? Scan this QR code:



weitere Sprachen

* Bezogen auf die Testkassette ohne Teststreifen und Verklebung. 2 % Plastikanteil ergeben sich durch die Beschriftungsfolie. Weitere Informationen auf der Website: areyou.de

** Geprüft nach validierten Verfahren im nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485 zertifizierten Herstellerlabor.