

Gebrauchsanweisung: Informationen für dich.

ARE YOU?



Multi Selbst-Test

Nachweis von 5 Substanzen

Laborgeprüfte* Qualität in 5 Minuten

Wofür ist der Schnelltest?

Mit dem AREYOU? High Multi Selbst-Test kannst du ganz einfach und schnell prüfen, ob in deinem Urin Rückstände einer oder mehrerer dieser fünf Substanzen nachweisbar sind: Cannabinoide („Weed“), Kokain („Koks“), Amphetamin („Speed“), Methamphetamin („Meth“) und Opiate (u. a. Morphin). Das Ergebnis gibt dir eine Orientierung und unterstützt dich dabei, Risiken besser einzuschätzen und verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen.

Die AREYOU? Testkassetten werden aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt und sind zu 98 % plastikfrei*. Unsere regionale Produktion in Deutschland und der Schweiz senkt unseren CO₂-Fußabdruck und bietet eine umweltfreundliche Alternative für alle, die wissen wollen, wo sie stehen.

Bitte lies diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um den Test korrekt durchzuführen und die Ergebnisse zuverlässig auszuwerten.

Wichtige Hinweise:

Zweck und Anwendung

- Dieser Selbst-Test dient ausschließlich der privaten, nicht-medizinischen und nicht-diagnostischen Selbstinformation und Orientierung. Er kann dir also bei deiner eigenen persönlichen Einschätzung helfen.

- Es ist stets zu berücksichtigen, dass der Test und sein Ergebnis von einer Vielzahl von Faktoren abhängen und auch die Möglichkeit eines ausnahmsweise falschen Testergebnisses besteht.
- Der Test ist nicht zur Diagnose, Behandlung oder Bewertung gesundheitlicher Zustände bestimmt und nicht für gesundheitsbezogene Entscheidungen geeignet. Er ist nicht für behördliche, forensische, straf-, arbeitsrechtliche oder klinische Anwendungen vorgesehen. Er ersetzt keine ärztliche Untersuchung oder Bestätigungsanalyse mittels Labordiagnostik.
- Für medizinisch und rechtlich verbindliche Aussagen wende dich bitte an ein medizinisches Labor, ärztliches Fachpersonal und lass dich auch juristisch beraten.
- Der Test weist ausschließlich die in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Substanzen bzw. Substanzklassen oder deren Abbauprodukte im Urin nach. Andere psychoaktive Wirkstoffe oder Substanzen, die nicht genannt sind, werden von diesem Test nicht erfasst. Ein negatives Testergebnis bedeutet daher nicht, dass mit Sicherheit keine Beeinträchtigung, Intoxikation oder Wirkung psychoaktiver Substanzen vorliegt.
- Bitte berücksichtige auch, dass der Test für Erwachsene, also Personen ab 18 Jahren ist.

Was macht diesen Schnelltest besonders?

- Prüfung von 5 Substanzen in nur einem Test.
- Präzise Ergebnisse in nur 5 Minuten.
- Testkassette zu 98 % plastikfrei*
- Laborgeprüfte Qualität**
- Bewährte Technologie aus dem professionellen Bereich – jetzt für die private Anwendung.

Welche Substanzen werden getestet?

Der AREYOU? High Multi Selbst-Test weist die in der Tabelle aufgeführten Substanzen bzw. deren Abbauprodukte im Urin nach. Die verwendeten Nachweisgrenzen orientieren sich an allgemein etablierten Cut-off-Werten aus dem professionellen Screening-Bereich, wie sie auch bei orientierenden Urin-Vortests im Rahmen von Verkehrskontrollen eingesetzt werden können:

Substanzkürzel (auf der Testkassette)	Substanz (-Klasse)	Szene-Namen	Was wird gemessen?	Nachweisgrenze
COC	Kokain	„Koks“; „Coke“; „Schnee“	Benzoyllecgonin (Abbauprodukt)	300 ng/ml
MET	Methamphetamin	„Meth“; „Crystal Meth“; „Ice“	D-Methamphetamine	500 ng/ml
THC	Cannabinoide	„Cannabis“; „Weed“; „Gras“; „Hanf“; „Marihuana“	THC-COOH (Abbauprodukt)	50 ng/ml
AMP	Amphetamin	„Speed“; „Pep“	D-Amphetamin	500 ng/ml
OPI	Opiate / Opioide (klassische, nicht-synthetische)	Morphin, Codein, Heroin	Morphin	2000 ng/ml

Wie wende ich den Schnelltest an?

Vorbereitung:

- Bitte prüfe vor der Anwendung, ob die Verpackung und alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.
- Bringe den Test vor der Durchführung auf Raumtemperatur (+15 °C bis +30 °C).
- Stelle einen sauberen Urinbecher und eine Stoppuhr bereit.
- Wasche deine Hände gründlich oder verwende saubere Handschuhe.
- Verwende den Test sofort nach dem Öffnen der Verpackung.

Anwendung:

-  1. Fange in einem sauberen Becher deine Urinprobe ab.
-  2. Öffne die Verpackung und klappe die beiden Flügel des Tests nach oben.
-  3. Tauche die Teststreifen für 15 Sekunden in deine Urinprobe ein.
-  4. Klappe die Flügel wieder zu und lege den Test flach auf eine saubere Unterlage.
-  5. Starte die Stoppuhr und lies das Ergebnis nach mindestens 5, aber maximal 10 Minuten ab.


Wie lese ich das Ergebnis korrekt ab?

Schritt 1: Gültigkeit prüfen

Die Kontrolllinie (C) muss immer sichtbar sein. Ist keine Kontrolllinie (C) sichtbar, ist der Test ungültig und darf nicht ausgewertet werden.

Schritt 2: Einzelne Substanzen auswerten

Der AREYOU? High Multi Selbst-Test zeigt für jede Substanz eine eigene Testlinie (T) an. Jede Testlinie ist mit einem Substanzkürzel gekennzeichnet. Substanzkürzel siehe Tabelle. Jede Substanz wird unabhängig von den anderen bewertet.

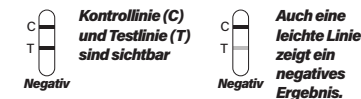

Nur die Kontrolllinie (C) ist sichtbar.

Positiv

Keine Kontrolllinie (C) sichtbar. Mit neuem Schnelltest wiederholen.

Ungültig

Was bedeuten die Testlinien?

C
COC
MET
THC

C
COC
MET
THC

C
COC
MET
THC

**Jede Testlinie steht für
eine getestete Substanz
(siehe Substanztabelle).**

Alle negativ: Substanz nicht nachgewiesen.

Die entsprechende Substanz liegt nicht vor oder ist unterhalb der Nachweisgrenze. Auch eine sehr schwache Testlinie gilt als negatives Ergebnis.

Testlinie positiv: Substanz nachgewiesen.

Die entsprechende Substanz liegt oberhalb der Nachweisgrenze und ist in der Probe vorhanden.

Was sollte ich dazu wissen?

Nach dem Konsum kann es einige Zeit dauern, bis Substanzen oder deren Abbauprodukte im Urin nachweisbar sind. Bitte führe den Test daher nicht kurz nach dem Konsum durch.

Die Nachweiszeit von psychoaktiven Substanzen, vor allem aber THC, hängt stark von der Konsum-Häufigkeit, Menge und deinem Stoffwechsel ab. Bei häufigem und regelmäßigem Cannabis-Konsum kann die Konzentration von THC-Abbauprodukten im Urin dauerhaft erhöht sein. Die Nachweisgrenzen behördlicher Vortests können von denen des AREYOU? High Multi Selbst-Tests abweichen. Das Testergebnis dient daher nur deiner privaten Orientierung und Selbstinformation.

Allgemeine Information

In Deutschland gilt, dass die/der unerlaubte/r Herstellung, Erwerb, Besitz, Handel etc. von Drogen nach dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) strafbar ist (§§ 29 ff. BtMG). Für Cannabis gelten gesonderte gesetzliche Bestimmungen. Der AREYOU? High Multi Selbst-Test dient ausschließlich deiner privaten Information und Orientierung. Er entbindet nicht von den gesetzlichen Regelungen. Die Anwendung, Interpretation und Nutzung der Testergebnisse liegt in deiner Verantwortung, ebenso die Entscheidungen, die du triffst, und deren etwaige Konsequenzen.

Inhalt

- 1 AREYOU? High Multi Selbst-Test
- 1 Gebrauchsanweisung
- 1 Silica-Gel

Wie funktioniert der Schnelltest genau?

Der Schnelltest basiert auf einem kompetitiven Immunoassay. Dabei konkurriert der gesuchte Stoff (Analyt) in deiner Urinprobe mit einem künstlich zugesetzten, markierten Vergleichsstoff um dieselben Antikörper-Bindungsstellen. Ist der gesuchte Stoff in höherer Menge vorhanden, blockiert er die Antikörper und verhindert, dass der markierte Vergleichsstoff binden kann – es erscheint keine Testlinie (Ergebnis: positiv). Ist der gesuchte Stoff nicht oder nur in geringer Menge vorhanden, kann der Vergleichsstoff binden und es bildet sich eine Testlinie (Ergebnis: negativ). Die Intensität der Linie kann variieren; auch eine sehr schwache Linie gilt als negativ.

Kann ein Schnelltest auch Fehler machen?

Wie bei jeder immunologischen Methode können Kreuzreaktionen mit Stoffwechselprodukten oder anderen verwandten Substanzen auftreten und falsch-positive oder falsch-negative Ergebnisse erzeugen.

Durch eine falsche Anwendung des Tests oder eine ungeeignete Probe kann es zu falschen Ergebnissen kommen.

Schnelltests liefern grundsätzlich ein qualitatives, vorläufiges Ergebnis. Eine zweite, beweisere Analyseverfahren muss verwendet werden, um ein bestätigtes Ergebnis zu erhalten.

Was tun, wenn ich mir wegen meines Konsums Gedanken mache?

Dieser Test ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung. Wenn du aufgrund deines Konsums besorgt bist, wende dich bitte an deinen Arzt oder eine Beratungsstelle. Die bundesweite digitale Suchtberatung für Betroffene und Angehörige ist kostenfrei unter folgender URL zu erreichen: www.suchtberatung.digital

Wie entsorge ich den Schnelltest?

Der verwendete Test gehört aufgrund der enthaltenen Urinprobe sowie einzelner nicht recycelbarer Bestandteile in den Restmüll. Bitte entsorge ihn nach der Anwendung sicher

verpackt im Hausmüll und beachte die örtlichen Entsorgungsvorschriften. Die Einzelverpackung (Pouch) ist im Dualen System (Grüner Punkt) lizenziert. Bitte entsorge den Pouch im Gelben Sack bzw. in der Gelben Tonne, damit das Material in Sortier- und Recyclinganlagen bestmöglich verwertet werden kann. Bei Mehrfachpackungen: Die Faltschachtel aus Karton bitte über die Papiertonne entsorgen.

Welche Materialien verwendet AREYOU?

Die Tests von AREYOU? werden so ressourcenschonend entwickelt wie kaum ein anderer Schnelltest. Die Testkassette besteht dabei zu 98 % aus nachwachsenden Rohstoffen. Leider können wir noch nicht ganz auf Kunststoff verzichten: Es braucht noch geringe Mengen, damit der Test reibungslos funktioniert (z. B. Beschriftungsfolie und Teststreifen). Die Einzelverpackung (Pouch) besteht aus Papier mit einer dünnen PE-Feuchtigkeitsbarriere. So bleibt der Test bis zum Ablaufdatum zuverlässig geschützt.

Wir arbeiten jeden Tag daran, den Kunststoffanteil unserer Produkte weiter zu reduzieren. Weitere Informationen zur Materialzusammensetzung findest du auf unserer Website: www.areyou.de

AREYOU? und der BADS

Dieser Test wird unterstützt vom Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (BADS). Bitte denke immer daran: Schon geringe Mengen Rauschmittel können die Fahrsicherheit beeinträchtigen. Nur nüchtern und rauchfrei fährst du sicher. Mehr Informationen zu Drogen im Straßenverkehr unter bads.de und speziell zu Cannabis unter safetrip.bads.de

Symbolverzeichnis



Von links nach rechts:

- Nicht wiederverwenden
- Nicht verwenden, wenn Verpackung geöffnet oder beschädigt ist
- Gebrauchsanweisung beachten
- Vor Nässe schützen
- Vor Sonnenlicht schützen
- Bei 2–30 °C lagern

Was muss ich noch beachten?

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Kontakt von Probenmaterial und Testreagenzien mit Haut und Schleimhäuten vermeiden. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

Hersteller:

Protzek Biotek GmbH
Tülingerstr. 36a, 79539 Lörrach
www.areyou.com, info@protekt.de

Du hast Fragen?

service@areyou.de

Hier geht's zur Videoanleitung und zum Webshop.



Are you looking for another language? Scan this QR code:



weitere Sprachen

* Bezogen auf die Testkassette ohne Teststreifen und Verklebung. 2 % Plastikanteil ergeben sich durch die Beschriftungsfolie. Weitere Informationen auf der Website: areyou.de

** Geprüft nach validierten Verfahren im nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485 zertifizierten Herstellerlabor.